



## POUČENÍ PRO LÉKAŘE – ANEB JAK VŠE UDĚLAT SPRÁVNĚ

### Získejte odběrovou sadu a přepravní box.

- Sadu pro odběr a přepravu krve získáte vyplněním **on-line objednávkového formuláře**, nebo na **telefonním čísle +420 724 748308**, nebo na **emailu: info@prenatalsafe.cz**.
- V sadě naleznete [Žádost o provedení testu](#), [Informovaný souhlas](#) a [Poučení pro klienty podstupující NIPT](#).

### Objednejte pacientku.

- Objednejte pacientku na odběr krve. Zavolejte nebo napište na jeden z výše uvedených kontaktů a my zařídíme kurýra, který si od Vás převezme zásilku s odebranou krví.

### Zkontrolujte platbu.

- Předejte pacientce poučení o platbě. Platba může proběhnout bankovním převodem, nebo vložení na účet.
- Cena testu **PrenatalSafe 5** je **12 500 Kč / 450 EUR** za standardní test. Test **PrenatalSafe Plus**, který navíc testuje chromozomy 9 a 16 a mikrolece stojí **14 500 Kč / 530 EUR**. **PrenatalSafe KARYO** je nabízen za **19 900 Kč / 730 EUR**. **PrenatalSafe KARYO Plus** pak za **22 900 Kč / 850 EUR**.
- Před odběrem krve zkontrolujte platbu pacientky! Doklad o úhradě může pacientka odeslat na email: **info@prenatalsafe.cz** nebo předložit potvrzení o úhradě bankovním převodem či vložení peněz na účet.

### Předejte k podpisu Informovaný souhlas.

- Předejte pacientce k podpisu [Informovaný souhlas](#) a zodpovězte případné otázky. Vše zkontrolujte! Podpis je nezbytný pro provedení testu!



## Vyplňte s pacientkou žádanku.

- Vyplňte společně s pacientkou Žádost o provedení testu.
- Pamatujte, že pacientka si může vybrat, zda chce znát pohlaví dítěte. Také si může vybrat z několika variant testu:
  - PrenatalSafe 5 (chromozomy 21, 18, 13, X a Y)
  - PrenatalSafe Plus (PrenatalSafe 5 + testování mikroleccí + chr. 9 a 16)
  - PrenatalSafe KARYO (testování početních a strukturních aberací všech chr.)
  - PrenatalSafe KARYO Plus (spojení testu KARYO a Plus)
- Požádejte pacientku, aby žádanku podepsala. Zkontrolujte podpisy. **Podpis tohoto dokumentu je nezbytný pro provedení testování na odebraném vzorku krve.**

## Odeberte krev.

- Z přepravního boxu vyjměte zkumavku.
- Na etiketu zkumavky napište **jméno a příjmení pacientky a její datum narození**.
- Odeberte do zkumavky 8-10 ml periferní krve tak aby byla zkumavka téměř plná
- Zkumavku 5-10krát promíchejte (dnem vzhůru a zase zpět).
- **Odebranou krev vždy skladujte při pokojové teplotě, nikdy neskladujte zkumavky v lednici nebo v mrazáku!**

## Uzavřete box a odešlete kurýrem.

- Zkumavku vložte do přepravního boxu s logem PrenatalSafe®.
- Do přepravního boxu přidejte podepsané dokumenty (Žádost o provedení testu, Informovaný souhlas). Box zavřete a vyčkejte na kurýra.
- Předějte kurýrovi box společně s přepravním listem, který jste o nás obdrželi emailem.

## Odešlete informace o odběru a vyčkejte na výsledek.

- Na [info@prenatalsafe.cz](mailto:info@prenatalsafe.cz) zašlete informaci o odeslání vzorku připojte informace 1. jméno pacientky 2. datum narození 3. datum odběru 4. doklad o úhradě testu pacientky
- Do 3-7 pracovních dnů od obdržení vzorku laboratoří Vám budou zaslány výsledky.